


Zender-Hebegürtel nach individueller Anpassung

Gebrauchsanweisung

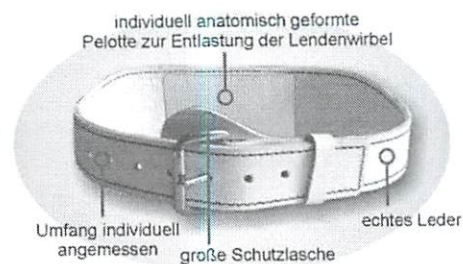

Sehr geehrter Mitarbeiter,

Sie haben einen speziell für Sie angefertigten Hebegürtel erhalten, der Ihnen die Arbeit erleichtern soll.

Wir bitten Sie, folgende Hinweise zu beachten:

- Der Hebegürtel wurde in Handarbeit in unserer Werkstatt in Saarbrücken nach ihren persönlichen Maßen angefertigt, damit er optimal stützen kann.
- Bitte legen Sie den Gürtel so an, dass die „Pelotte“ (das stützende Element im rückwärtigen Bereich) an der Lendenwirbelsäule (unterer Rücken) anliegt.
- Spannen Sie den Gürtel mit dem Klettverschluss so, dass Sie eine stützende Wirkung spüren, aber die Atmung nicht beeinträchtigt ist.
- Es dürfen durch das Anlegen auch keine Schmerzen entstehen.

Der Gürtel verhindert durch seine Form, dass Sie beim Heben eine falsche Haltung einnehmen. In solchen Fällen drückt der Gürtel im vorderen Bauchbereich – bitte achten Sie dann darauf, dass Sie nicht aus dem Rücken heraus heben, sondern aus den Beinen!

- Zur Pflege des Gürtels können Sie ihn mit einem feuchten Tuch abreiben. Bitte waschen Sie ihn aber nicht.
- Um eine gute Verträglichkeit, auch bei Allergikern zu erreichen, ist der Gürtel aus sehr hochwertigem Leder hergestellt. Das Polster- und Bezugsmaterial nimmt den Schweiß auf und ist anti-allergisch. Da Leder ein Naturmaterial ist, können Verfärbungen (Nachdunkeln) auftreten, die aber die Funktion nicht beeinträchtigen.

Bitte sprechen Sie uns jederzeit bei Fragen an!

Ihr Team der



Zender Orthopädie GmbH

Zentrale Hotline: 0681 – 90 68 60

Saarbrücken
Sulzbachstrasse 11
Tel. 0681 – 90686-20
www.zender-orthopaedie.de

Wadgassen
Provinzialstraße 59
Tel. 06834 – 401450